

# KORZYSTANIE Z RAPORTÓW W APLIKACJI


System CGM Eversense automatycznie tworzy 3 raporty, które w każdej chwili można wyświetlić bezpośrednio w aplikacji.

Te raporty mogą ułatwić pacjentowi i lekarzowi optymalizowanie indywidualnego planu zarządzania cukrzycą.

➤ Aby uzyskać dostęp do raportów w aplikacji, wybierz **Menu główne > Raporty**.


## Raport Tygodniowe zestawienie modalne

- Przedstawia podsumowanie informacji o stężeniach glukozy z ostatnich siedmiu dni w postaci 24-godzinnych wykresów liniowych
- Pozwala łatwo zaobserwować trendy zmian poziomu glukozy w różnych porach dnia
- **Czerwone słupki (paski)** odzwierciedlają zmienność stężenia glukozy w danym momencie
- Po przewinięciu w dół można zapoznać się z dodatkowymi statystykami glukozy w zadanych przedziałach czasu

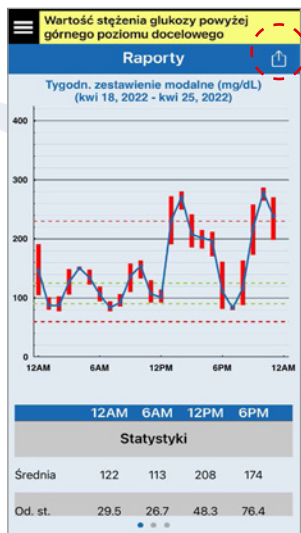


## Raport Wykres kołowy poziomu glukozy

- Przedstawia czas, przez jaki poziom glukozy utrzymywał się w zakresie docelowym, był poniżej zakresu docelowego i powyżej zakresu docelowego
- Może odzwierciedlać dane z 1, 7, 14, 30 lub 90 dni
- Porównując dane z różnych okresów, pacjent i lekarz mogą ocenić skuteczność wprowadzanych zmian w leczeniu cukrzycy

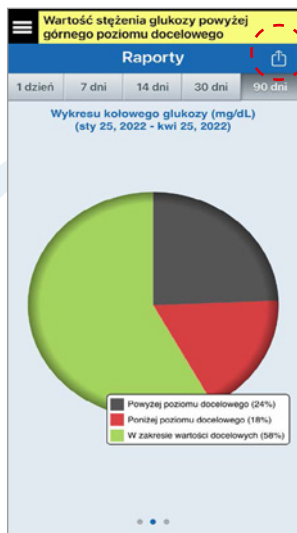

## Raport statystyk poziomu glukozy

- Przedstawia średnie, niskie i wysokie stężenia glukozy w zadanych przedziałach czasu
- Może odzwierciedlać dane z 1, 7, 14, 30 lub 90 dni
- Porównując dane z różnych okresów, pacjent i lekarz mogą ocenić skuteczność wprowadzanych zmian w leczeniu cukrzycy

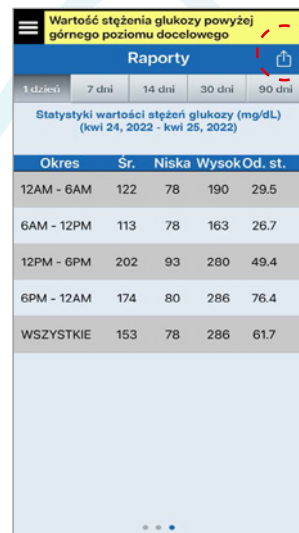

Wszystkie raporty można przeglądać, wysłać pocztą e-mail i drukować bezpośrednio z aplikacji!

System Ciągłego Monitorowania Glukozy (CGM) Eversense® E3 jest przeznaczony do ciągłego pomiaru glukozy przez okres do 180 dni u osób chorych na cukrzycę które ukończyły 18 lat. System jest zarejestrowany do podejmowania decyzji terapeutycznych. Pomiar glikemii za pomocą glukometru we krwi włośniczkowej pobranej z opuszki palca jest wymagany tylko w celu kalibracji, od 21 dnia stosowania systemu zwykle 1 x dziennie. Pomiary z użyciem glukometru powinny być wykonane w sytuacji kiedy objawy nie odpowiadają wskazaniom sensora lub w przypadku przyjmowania leków z grupy tetracyklin. Procedura implantacji i usuwania sensora wykonywana jest przez lekarza posiadającego w tym zakresie uprawnienia. System Eversense E3 CGM można zakupić na stronie [diabetyk24.pl](https://diabetyk24.pl)

**Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się na stronie**  
<https://global.eversensediabets.com/safety-info>

Eversense, Eversense E3 Continuous Glucose Monitoring i logo Eversense są znakami towarowymi firmy Senseonics, Incorporated. Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Nie należy wnioskować ani sugerować żadnych związków ani poparcia.

© 2022. Senseonics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

© 2022. Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Dystrybutor:  
ASCENSIA DIABETES CARE POLAND Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 92  
00-807 Warszawa, Polska  
+48 22 372 72 20, wew. 4 | [www.diabetes.ascensia.pl](http://www.diabetes.ascensia.pl)



System ciągłego monitorowania glukozy

Producent: Senseonics, Inc.  
20451 Seneca Meadows Parkway  
Germantown, MD 20876-7005