


System CGM Eversense automatycznie tworzy 3 raporty, które w każdej chwili można wyświetlić bezpośrednio w aplikacji. Te raporty mogą ułatwić pacjentowi i lekarzowi optymalizację indywidualnego planu zarządzania cukrzycą.

➔ Aby uzyskać dostęp do raportów w aplikacji, wybierz **Menu główne > Raporty**.


Raport Tygodniowe zestawienie modalne

- Przedstawia podsumowanie informacji o stężeniach glukozy z ostatnich siedmiu dni w postaci 24-godzinnych wykresów liniowych
- Pozwala łatwo zaobserwować trendy zmian poziomu glukozy w różnych porach dnia
- **Czerwone słupki (paski)** odzwierciedlają zmienność stężenia glukozy w danym momencie
- Po przewinięciu w dół można zapoznać się z dodatkowymi statystykami glukozy w zadanych przedziałach czasu

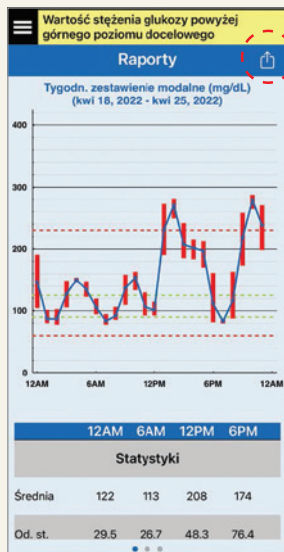

Raport Wykres kołowy poziomu glukozy

- Przedstawia czas, przez jaki poziom glukozy utrzymywał się w zakresie docelowym, był poniżej zakresu docelowego i powyżej zakresu docelowego
- Może odzwierciedlać dane z 1, 7, 14, 30 lub 90 dni
- Porównując dane z różnych okresów, pacjent i lekarz mogą ocenić skuteczność wprowadzanych zmian w leczeniu cukrzycy

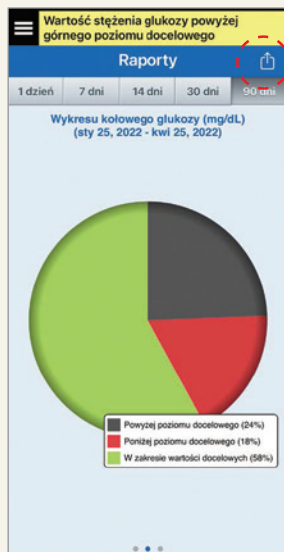

Raport statystyk poziomu glukozy

- Przedstawia średnie, niskie i wysokie stężenia glukozy w zadanych przedziałach czasu
- Może odzwierciedlać dane z 1, 7, 14, 30 lub 90 dni
- Porównując dane z różnych okresów, pacjent i lekarz mogą ocenić skuteczność wprowadzanych zmian w leczeniu cukrzycy

Okres	Sr.	Niska	Wysok	Od. st.
12AM - 6AM	122	78	190	29.5
6AM - 12PM	113	78	163	26.7
12PM - 6PM	202	93	280	48.3
6PM - 12AM	174	80	286	76.4
WSZYSTKIE	153	78	286	61.7



Wszystkie raporty można przeglądać, wysłać pocztą e-mail i drukować bezpośrednio z aplikacji!