

Uzyskiwanie dostępu do swoich danych CGM

Twoje konto w systemie zarządzania bazą danych (DMS) Eversense jest używane przez aplikację mobilną Eversense i przez aplikację sieciową Eversense DMS. **Jeśli aplikacja Eversense została już pobrana i aktywowana przez e-mail, przejdź od razu do kroku 3.**

1 Zakładanie konta Eversense



- Pobierz i zainstaluj aplikację mobilną Eversense.

Pobierz bezpłatną aplikację Eversense z Apple App Store lub Google Play*.



- Po zaakceptowaniu umowy licencyjnej pojawi się prośba o utworzenie i zarejestrowanie konta z przypisanym adresem e-mail i hasłem.
- Po wprowadzeniu danych na każdym ekranie dotknij strzałki u dołu, aby przejść do następnego ekranu.

Dotknij opcji **Utwórz konto**.

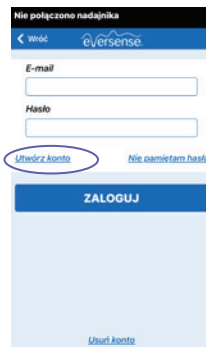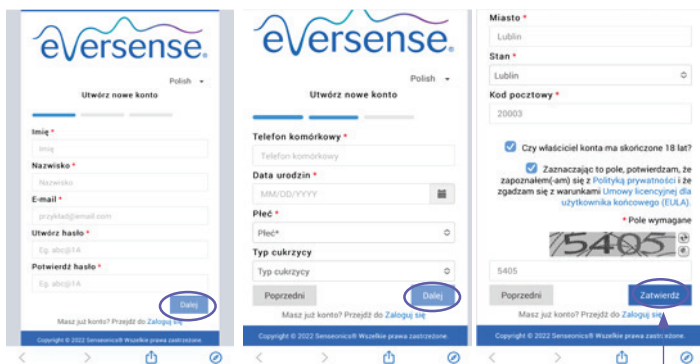



Dotknij opcji **Prześlij**.

* Pełną listę obsługiwanych urządzeń można znaleźć na stronie <https://www.ascensidiabetes.com/eversense/compatibility>

2 Aktywacja konta Eversense

Po przesłaniu informacji o koncie za pośrednictwem aplikacji otrzymasz z systemu Eversense wiadomość e-mail z linkiem umożliwiającym dokończenie rejestracji i aktywację konta.

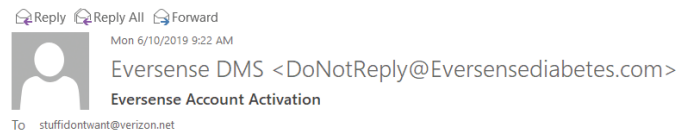

You have registered for an Eversense account. To activate your account [click here](#).
Thanks,
The Eversense Team
www.eversenseddiabetes.com

Ważne: Aby aktywować konto, kliknij link w wiadomości w ciągu 72 godzin od otrzymania go.



Gratulacje! Twoje konto zostało aktywowane. Możesz kliknąć link, aby zalogować się i przeglądać swoje raporty z danymi o stężeniu glukozy.

3 Zanotuj swoje dane logowania do systemu DMS poniżej, aby w przyszłości móc je odnaleźć

E-mail: _____

Hasło: _____

4 Uzyskiwanie dostępu do konta DMS za pośrednictwem komputera

Za pośrednictwem aplikacji Eversense zawsze jesteś zalogowany(-na) na swoim koncie, ale żeby uzyskać pełny dostęp do wszystkich swoich danych, przejdź na stronę: <https://globalpro.eversensedms.com> i wprowadź swoje dane logowania.

Pamiętaj, że Twoje dane logowania są takie same, jak podane przy zakładaniu konta Eversense.

Rozwiązywanie problemów

Nie mogę załogować się do systemu Eversense DMS, dlaczego?


Prawdopodobnie konto nie zostało aktywowane poprzez kliknięcie linku w wiadomości e-mail w ciągu 72 godzin. W takiej sytuacji wystarczy kliknąć link w wiadomości e-mail, co spowoduje przejście na stronę umożliwiającą ponowne wysłanie linku.

5 Zezwalanie lekarzowi na dostęp do Twoich danych


Przypisz lekarza do swojego konta Eversense DMS

1. Przejdź na stronę: <https://global.eversensedms.com/login> i wprowadź swoje dane logowania.
2. W menu po lewej stronie wybierz opcję Udostępnianie danych.
3. Wpisz numer placówki medycznej przypisany jej w systemie Eversense DMS Pro i naciśnij klawisz ENTER na klawiaturze.
4. Wybierz swojego lekarza[†] z listy rozwijanej Dostawca.
5. Kliknij opcję „Udostępnij moje dane”. Zostanie wyświetlona nazwa placówki, imię i nazwisko lekarza, status i informacja o udostępnianiu danych. Dopóki placówka nie zaakceptuje Twojego zaproszenia, status będzie wyświetlany jako Wstrzymano. Gdy placówka zaakceptuje zaproszenie, status **Oczekujące** zmieni się na **Zaakceptowany**, a w kolumnie Udostępnianie danych symbol ✖ zmieni się na ✔. Teraz lekarz będzie mógł przeglądać Twoje dane na swoim koncie w systemie Eversense DMS Pro.

Numer placówki medycznej znajduje się w prawym górnym rogu strony. Jeśli nie jest wpisany, zapytaj o niego w placówce, w której pracuje Twój lekarz.

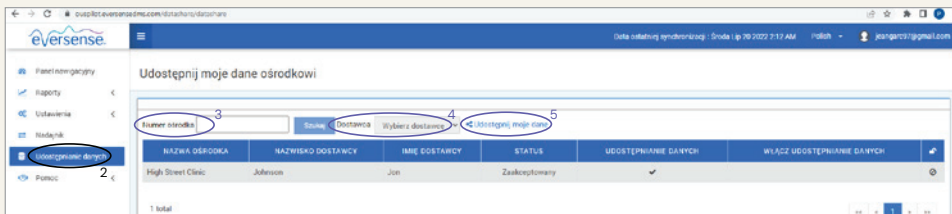

Można przeglądać, drukować i wysyłać raporty pocztą e-mail

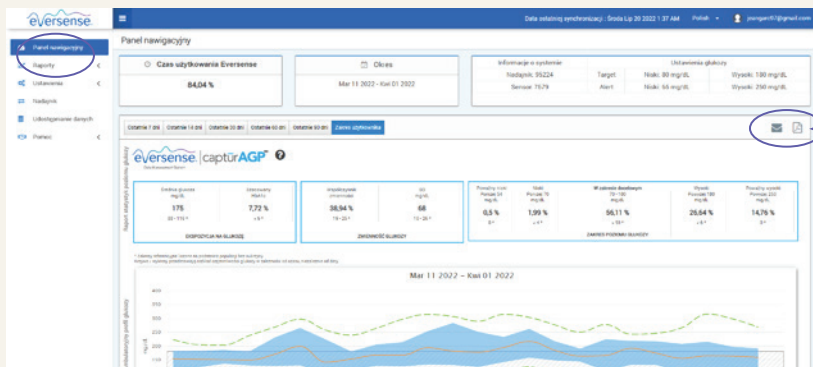

Swoje raporty możesz drukować i wysyłać pocztą e-mail. Kliknij ikonę drukarki, aby wyświetlić i wydrukować raport lub kliknij ikonę koperty, aby wysłać go pocztą e-mail.

W menu ustawień znajdują się opcje **RAPORT PODSUMOWUJĄCY** umożliwiające skonfigurowanie regularnego, automatycznego generowania raportu, który będzie wysyłany do Ciebie pocztą e-mail. Możesz określić, jak często raporty będą wysyłane i jakiego rodzaju raporty chcesz otrzymywać.

6 Interpretowanie raportów w systemie Eversense DMS

Na stronie <https://www.diabetes.ascensia.pl/eversense-e3/> dowiesz się, w jaki sposób dane mogą pomóc Ci w kontrolowaniu cukrzycy. Po przejściu na tę stronę kliknij link **BIBLIOTEKA ZASOBÓW**.

Aby skontaktować się z obsługą klienta, zadzwoń pod numer: +48 22 372 72 20 wew.4

[†] Aplikacja stosuje odpowiednie mechanizmy ochrony, by Twoje dane osobowe były przetwarzane bezpiecznie i zgodnie z prawem.