

Pacjent zainteresowany systemem CGM Eversense E3?

- Edukacja pacjenta dotycząca działania systemu CGM Eversense E3:
 - Przełącz pacjentowi broszurę dla pacjenta
 - Poinformuj, które urządzenia są kompatybilne z systemem Eversense
 - Wyjaśnij przeciwwskazania
 - Omów wymagania dot. samokontroli glikemii
 - Omów najważniejsze korzyści ze stosowania systemu CGM Eversense E3
 - Długi czas działania sensora
 - Zdejmowalny inteligentny transponder generujący alarmy wibracyjne odczuwane na skórze
 - Dokładność

System CGM Eversense E3 został dostarczony do placówki medycznej

- Dostarczone opakowanie z sensorem umieść od razu w lodówce
- Zapewnij dostępność specjalnych zestawów zabiegowych
- Umów pacjenta na zabieg implantacji
- Omów z pacjentem kartę wizyty
 - Poinformuj pacjenta, aby pobrał aplikację i założył konto użytkownika
- Zapewnij dostępność potrzebnych materiałów w dniu implantacji
- Sprawdź terminy przydatności wszystkich materiałów
- Zapewnij dostępność pomieszczenia w terminie implantacji oraz:
 - specjalny zestaw zabiegowy
 - jałowe rękawiczki
 - roztwór lidokainy o stężeniu 1% lub 2% (z dodatkiem epinefryny lub bez)
 - roztwór chloroheksydyny lub betadyny albo 3 waciki Chloraprep
- Rozpoczęcie edukacji
 - Zapoznaj się z materiałami edukacyjnymi na stronie **www.diabetes.ascensia.pl**
 - Pobierz materiały edukacyjne ze strony internetowej Ascensia Diabetes Care (www.diabetes.ascensia.pl)
 - Materiały edukacyjne można też zamówić w Dziale obsługi klienta Ascensia Diabetes Care 48 22 372 72 20 (08:00–17:00)

W dniu zaplanowanej implantacji systemu CGM Eversense E3

- Zadbaj o naładowanie inteligentnego transpondera
- Upewnij się, że aplikacja została pobrana na urządzenie mobilne pacjenta
- Połącz inteligentny transponder z urządzeniem mobilnym
- Połącz sensor z inteligentnym transponderem/urządzeniem mobilnym
- Przełącz pacjentowi plastry, pudełko z inteligentnym transponderem i materiały eksploatacyjne
- Kontroluj proces edukacji pacjenta
- Przełącz instrukcje synchronizowania danych pacjenta z placówką

Gdy system CGM Eversense E3 już działa

- Zaplanuj dalsze działania/umów następną wizytę
- Umów wizytę na ponowną implantację po 180 dniach
- Przypomnij pacjentowi o zamówieniu sensora systemu CGM Eversense E3 na 1 miesiąc przed terminem wizyty pacjenta
- Materiały edukacyjne są dostępne na stronie **www.diabetes.ascensia.pl**





- ➔ Zestaw sensora Eversense
- Umieść od razu zestaw w lodówce (wymiary opakowania: 17,8 x 8,1 x 2,5 cm)
 - Sprawdź terminy przydatności
 - 1 zestaw na pacjenta
 - Zaleca się zaopatrzenie placówki w zapasowy sensor



- ➔ Zestaw narzędzi do implantacji
- Zawiera szablon do nacięcia, narzędzia do implantacji i instrukcje obsługi
 - Sprawdź terminy przydatności
 - 1 zestaw jest automatycznie dostarczany z każdym zamówionym sensorem
 - Zalecane jest zaopatrzenie placówki w zapasowy zestaw narzędzi



- ➔ Zestaw inteligentnego transmitera
- Zawiera: ładowarkę (stację dokującą), zasilacz i instrukcje obsługi
 - Naładuj inteligentny transponder w dniu implantacji
 - 1 zestaw z roczną gwarancją na każdego nowego pacjenta



- ➔ Zestaw plastrów
- 150 białych i 30 przezroczystych plastrów (razem 180 plastrów)
 - Sprawdź terminy przydatności



- ➔ Specjalny zestaw zabiegowy
- Zawiera elementy jałowe i niejłowe
 - NIE zawiera jałowych rękawiczek, lidokainy, chloroheksydyny/betadyny